



Стандарт ЕСЕ
Группы: II - III
15 - 36 кг

NAVIGATOR

Первое в мире
складное реабилитационное автокресло


Thomashilfen

Rehabmedical

АВТОКРЕСЛО NAVIGATOR

Люди, которые много путешествуют, хотят быть гибкими и независимыми. Обычное реабилитационное автокресло часто слишком громоздко, особенно во время путешествий. Уникальный THOMASHILFEN Navigator в качестве второго сиденья облегчает активную семейную повседневную жизнь. Его можно сложить и взять с собой в мгновение ока. Дети не только безопасно сидят в машине, но и там, где им не подходит окружающая среда.



Продуманный СКЛАДНОЙ ДИЗАЙН исполняет мечту родителей о небольшом месте для хранения и легкой переноске.



ПОДСТАКАННИК
большой подстаканник (устанавливается справа или слева) — для напитков, перекуса или игрушек

ОБИВКА
мягкую обивку можно полностью снять и стирать в стиральной машине при 40° С.

АБДУКЦИОННЫЙ БЛОК
мягкий абдукционный блок, регулируемый в двух положениях, предотвращает скрещивание ног

ПОДГОЛОВНИК
регулируемый по высоте в семи положениях - легко и быстро регулируется



5-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ
надежное удержание с пятиточечным позиционным ремнем, удобная нагрудная защелка предотвращает перекручивание ремней

БОКОВЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БЛОКИ
Дополнительные большие боковые блоки удобно поддерживают ребенка



СКЛАДНОЕ СИДЕНЬЕ
сложенное сиденье удобно переносить с помощью ручки


КРЕПЕЖНЫЕ РЕМНИ
встроенный крепежный ремень для использования вне автомобиля



В каждом повседневном использовании (примеры)



используется в качестве второго сиденья в машине, когда обычное реабилитационное автокресло слишком громоздко или находится в другом автомобиле

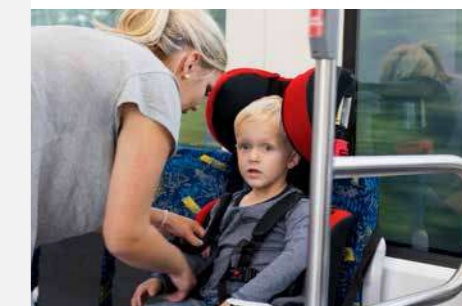

может также использоваться на дороге в автобусах и поездах, если важно надежно удерживать сиденье



безопасное сиденье во время семейных выходов, когда начинается заслуженный отдых.

Согласно требованиям стандарта безопасности ECE автокресло должно быть подвергнуто тестированию в фронтальном столкновении на скорости 50км/ч и при ударе сзади на 30 км/ч.

АВТОКРЕСЛО Navigator

Реабилитационное оборудование (выбор)



5-точечный позиционный ремень, удобная нагрудная защелка предотвращает перекручивание ремней



Мягкий абдукционный блок, регулируемый в двух положениях, предотвращает скрещивание ног



Дополнительные большие боковые блоки оптимально поддерживают ребенка



Встроенный крепежный ремень для использования вне автомобиля, но на дороге

Аксессуары (выбор)



В практичной сумке-переноске сложенное сиденье удобно нести на плече или убрать на хранение

5 вариантов обивки



СЕРЫЙ



КРАСНЫЙ



СИНИЙ



ЗЕЛЕНый



МАДЖЕНТА

Мягкая дышащая обивка обеспечивает приятное сидение без раздражающего потения. Обивку можно полностью снять и стирать в стиральной машине при 40° С.

Размеры и вес складного автокресла Navigator

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Глубина сиденья | 32 cm |
| Ширина сиденья спереди | 26 cm |
| Ширина сиденья, сзади | 26 cm |
| Высота спинки (сиденья) | 61 - 71 cm |
| Высота плеча (направляющая ремня) | 37 - 47 cm |
| Размеры в сложенном виде (Ш x В x Д) | 40 x 43 x 31 cm |
| Общие размеры (Ш x В x Д) | 68 x 45 x 37 cm |
| Вес сиденья | ок. 5 кг |
| Максимальная нагрузка | 15 - 36 кг |

Базовая комплектация:

сиденье и спинка с регулируемым по высоте в семи положениях подголовником; полностью складное сиденье; подушка сиденья с абдукционным блоком (регулировка в двух положениях); задняя подушка с боковыми накладками; подушка для головы; дополнительные подушки для головы (левая, правая); 5-точечный позиционный ремень; соединитель ремня; подстаканник (устанавливается справа или слева); крепежный ремень для использования вне автомобиля; съемные чехлы, можно стирать в стир. машине при 40° С.