



# SOUND BEAM®

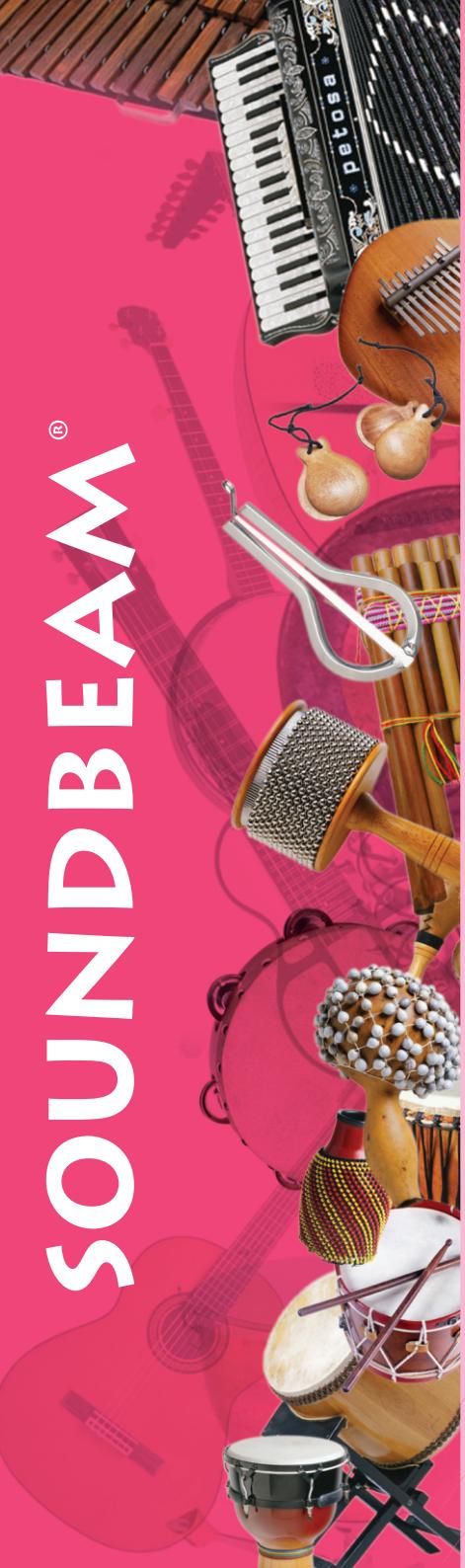

## Некоторые направления использования системы САУНДБИМ:

- развитие мелкой моторики и гашение непроизвольных движений(гиперкинезов)
- улучшение рисунка ходьбы развитие и закрепление правильной осанки
- улучшение общей подвижности пациента
- развитие ощущения собственного тела в пространстве
- обучение способности слушать и концентрировать внимание
- развитие мотивации
- открытие способности к импровизации и творческой активности
- развитие навыков общения
- развитие настойчивости в достижении цели

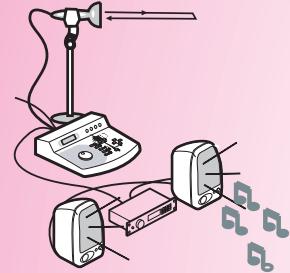

Для получения дополнительной информации по данной системе и почему оборудованию нашей компании, пожалуйста, связывайтесь с нами по следующим адресам:

Адрес Компании Рехаб энд Медикал в Великобритании:

Rehab and Medical Limited  
259 Didsbury Road  
Stockport, SK4 3JG

Tel: +44 (0) 161 431 5056

Fax: +44 (0) 161 431 5057

e-mail: rehabandmedical@btconnect.com

Адрес ООО “Рехаб энд Медикал”:

129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 20“А”,  
стр. 1, офис 15

тел./факс: (495) 686-40-47, 644-31-43;

e-mail: info@rehabmedical.ru

[Http://www.rehabmedical.ru](http://www.rehabmedical.ru)

**Reha**+medical



## Новая система САУНДБИМ - новая возможность развития и совершенствования.

*“Саундбим абсолютно точно может открыть замок к потенциалу ребенка.*

*Он дает возможность ребенку использовать любую, даже самую малую часть своих умственных и физических способностей для познания и входа в мир...”*

*Нина Джерард, учительница музыки,  
школа Брайрвуд, г.Бристоль*

## Дайте Вашему пациенту шанс выразить себя!




## Что такое САУНДБИМ?

САУНДБИМ не музикальный инструмент - это новый способ играть на музыкальном инструменте.

Независимо от круга Ваших интересов - будь это танец и движение, лечение или просто сочинение музыки - это один из очень немногих способов игры на музыкальном инструменте, который дает возможность людям с различными физическими возможностями и уровнем подготовки музицировать на равных.

Придуманный композитором Эдвардом Уильямсом для нужд профессиональных танцоров, САУНДБИМ теперь для каждого сужает пропасть между тем, что можно вообразить и тем, что можно достичнуть. Более 1500 школ и других учреждений в 25 странах используют этот метод создания и исполнения музыки, который широко признан как успешное обучающее и развивающее средство.

Даже самые маленькие движения пользователя в луче воспроизводят музыкальные фразы или звуки, как будто музыкант играет на невидимом инструменте!

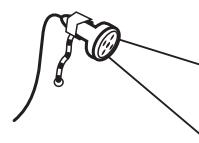

## Как работает САУНДБИМ?

САУНДБИМ посылает поток ультразвуковых импульсов. Сигнал, отраженный от любого предмета, который прерывает этот невидимый луч, возвращается обратно, как эхо. Длина каждого луча варьируется от 25 см до 6 м.

САУНДБИМ использует до 4 независимых ультразвуковых сенсоров, получающих информацию о движении.

САУНДБИМ улавливает прерывание, измеряет время, за которое импульс дошел до препятствия и возвратился в виде эха, расшифровывает информацию в виде нот различной высоты с помощью аналогово-цифрового преобразователя и формирует указания по воспроизведению этих нот, передаваемые через МИДИ-порты электронному музыкальному инструменту.

Саундбим имеет тридцать уже запрограммированных пейзажей с разными музыкальными или тематическими комбинациями звуков. Со всеми уже запрограммированными комбинациями можно сделать очень многое без каких-либо дополнительных изменений, используя только то, что уже вложено в систему. Кроме того, есть сто пустых программ для записи собственной музыки. Таким образом, Саундбим открывает горизонты для творения многообразных вещей. Он даёт возможность програмировать собственные звуки и использовать сотворенные самими исполнителями звуки и комбинации, слагая их вместе и сочиняя композиции для себя или для выступлений.



## Почему САУНДБИМ эффективен?

САУНДБИМ представляет собой средство, с помощью которого человек с серьезными отклонениями в развитии или физическими недостатками может выразить себя и начать общаться через музыку и звук.

Его легко отрегулировать для реагирования на самые мелкие и самые размашистые движения, тем самым способствовать решению широкого спектра проблем для каждого пациента. Чувство независимости и контроля над происходящим является мощным мотиватором, стимулирующим процесс обучения и общения и в других сферах жизни.

САУНДБИМ рекомендован Национальной программой музыкального образования Великобритании как основной источник помощи необучаемым детям.

Его успех базируется на двух факторах: во-первых, высокая чувствительность луча позволяет "играть" музыку даже людям, крайне ограниченным в движениях, во-вторых, электронные технологии позволяют создать огромную палитру звуковых миров, освобождая их автора от традиционных ограничений.

Первоначально САУНДБИМ был сконструирован для профессиональных танцоров; его признание в области специального образования и терапии стало пользовательской находкой. Терапевтический эффект САУНДБИМ был протестирован специалистами крупнейших медицинских учреждений, таких как Королевский госпиталь для людей с неврологическими отклонениями и Детский Госпиталь Бэт Абрахам в Нью-Йорке, и других учреждений, а также в сотнях специальных учебных заведений.

Возможности использования системы САУНДБИМ в области реабилитации детей и взрослых с неврологическими отклонениями - патологией двигательной сферы, слабым зрением или слухом и другими нарушениями - безграничны.

САУНДБИМ можно легко отрегулировать для реагирования от малейших до самых размашистых движений, тем самым способствовать решению широкого спектра проблем для каждого пациента.

Кроме использования системы САУНДБИМ в автономном режиме, она может быть установлена в наших Сенсорных Комнатах для создания дополнительных эффектов и атмосферы обратной связи в сенсорной комнате.

Сотни реабилитационных учреждений в Великобритании и многих других странах используют систему САУНДБИМ. Все они дают высокую оценку результатов ее использования.

